

みんなが笑顔になれる社会のために
介護の日常を
もっと安心、快適に

J-PAS fleairy

<マニュアル>



令和4年度川崎市介護ロボット等導入支援事業
受託運営：株式会社シグマスタッフ



装着時の中腰がラクに

目次


<u>製品情報</u>	<u>3</u>
<u>いろいろな場面で活躍</u>	<u>4</u>
<u>うれしい7つの機能</u>	<u>5</u>
<u>フレアリーの装着</u>	<u>7</u>
<u>フレアリーの3つのモード</u>	<u>11</u>

製品情報

機器本体外寸	W:222mm D:94mm H:289mm
本体重量	総重量:約2kg
電源	リチウムイオン電池
連続稼働時間	約4h
防塵防水性	IP55(浴室作業可)

装具サイズバリエーション

		身長(cm)	ウエスト(cm)
ベスト	S	145~160	65~105
	M	160~170	75~115
	L	170~185	85~125
脚部ベルト	S	145~160	—
	M	160~170	—
	L	170~185	—
膝パッド	大腿最小範囲(cm)		
	S	32~37	※下膝最小範囲 膝頭から 10cm程 上の周長
	M	37~42	
L	42~47		

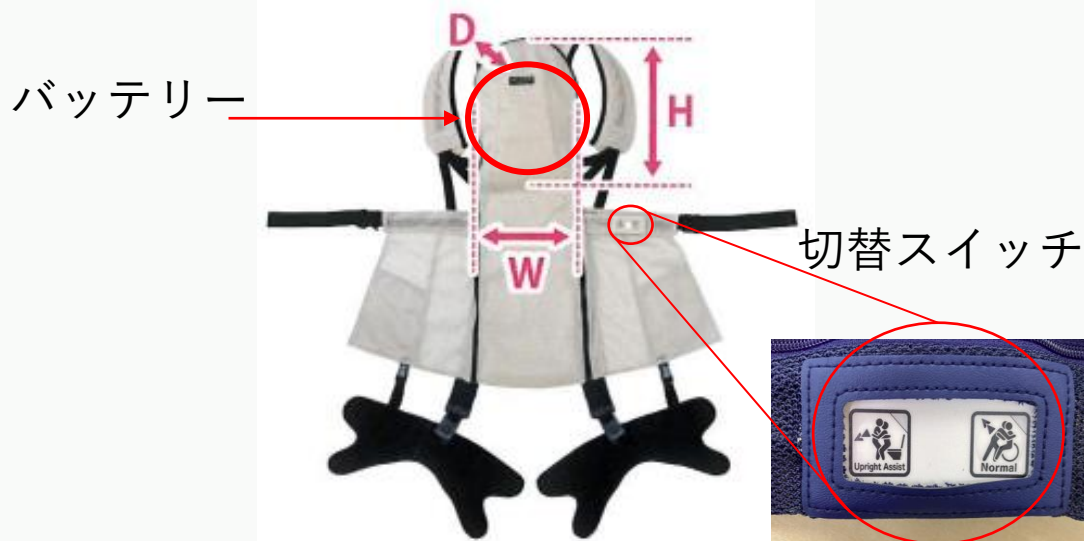

いろいろな場面で活躍



うれしい7つの機能

大型肩パッドでカラダにフィット

大きな肩パッドが優しくカラダにフィットし、食い込みや圧迫感を軽減



2

汚れても安心洗える装具

汚れてしまった場合でも、ネットに入れ洗濯機で簡単に洗えます。



3

様々な動作でも安心膝パッド

面ファスナーで装着者の体形に優しくフィットし、さまざまな作業姿勢によるずれを防止します。



うれしい7つの機能



業界最軽量
コンパクト
設計

コンパクトで軽く動きやすく作業を邪魔しません。



左右に便利な
ポケット付き

たくさんのご要望を頂き、ポケットを採用。スマホやメモ、消毒液入れに。



手元の近くで
簡単切り替え
ボタン

3つのモードを作業にあわせて簡単切り替え




防水機能
入浴介助が
できる

IP55をクリアし、浴室作業が可能。ベストは乾きやすい記事を採用

フレアリーの装着

<step 1>

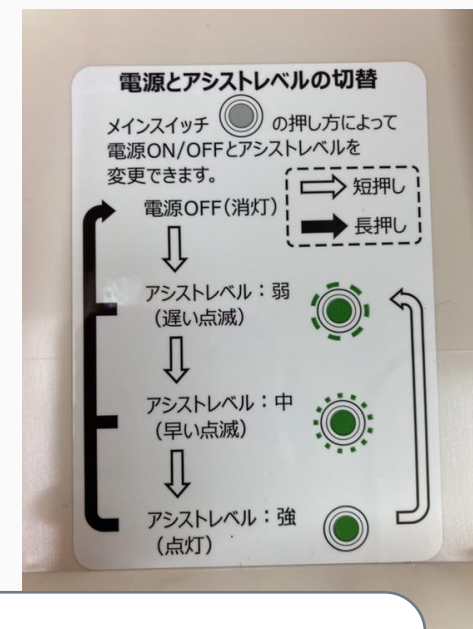

電源を入れる

背中側のファスナーを開け、バッテリーの蓋を外し、電源を入れる。

フレアリーの装着

<step 2>



肩ベルト

リュックサックのように背負い、肩ベルトで装着者の体形に合わせて調整。

腰ベルト

バックルをしめ、装着者のサイズに合わせて調整。

フレアリーの装着

<step 3>



膝パッド


膝がしらを挟むようにして、面ファスナーで止めて装着完了。

スイッチON

右腰のあるスイッチを長押しで起動。アシスト開始。

フレアリーの装着

簡単脱着 約**20**秒

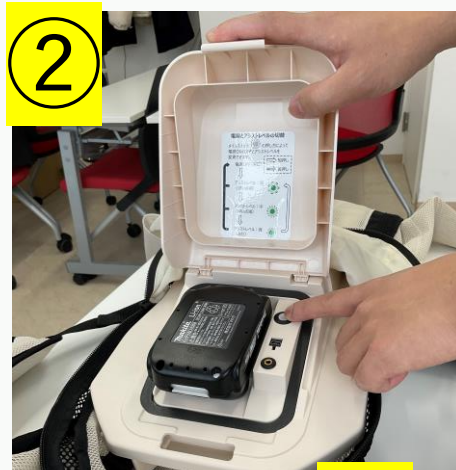

必要に応じて選べる3つのモード！



通常アシストモード

背中動きや角度に応じてメインベルトのアシストがかかります。腰に負担がかかる動作を自動でサポート。



立位保持アシストモード

メインベルトが常に強い力で引っ張られます。背中を曲げない状態で、膝を曲げたままの姿勢を保持する必要があるときに使用します。



同時に
長押し



フリー動作モード

ベルトが緩まない程度でメインベルトが引っ張ります。しゃがむ、体を曲げるなどの自由な動きができます。